


## Orientações gerais para confecção de máscara cirúrgica

### 1 - Material


- a. Tecido não tecido 100% polipropileno de preferência na cor branca, com 40g/m<sup>2</sup> para parte externa da máscara;
- b. Tecido não tecido 100% polipropileno SMS (tecido produzido com tecnologia de spunbonded + meltblown + spunbonded), atóxico, barreira bacteriana BFE (eficiência a filtração de bactérias > 98,9%), com capacidade hidrorrepelente, gramatura 50g/m<sup>2</sup> e de preferência na cor azul para parte interna da máscara;
- c. Fio de alumínio revestido (amarelo), 0,9cm;
- d. Fio elástico roliço, 30cm.
- e. Material para costura (linhas, máquinas e etc).

### 2 – Passo a passo

- a. Separar recorte do tecido das partes externas (branco) em 21cm de largura e 34cm de altura;

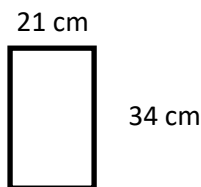

- b. Separar recorte de tecido da parte interna (azul) em 21 cm de largura e 17 de altura;

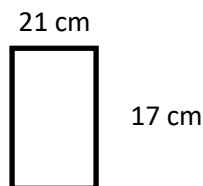

- c. Colocar tecido com barreira bacteriana (SMS) entre duas camadas de tecido sem barreira (polipropileno 100% comum);
- d. Passar costura em máquina de overlock na parte superior da máscara;
- e. Posicionar amarelo abaixo da costura de overlock e dobrar 1 cm da extremidade do tecido, de maneira que o amarelo fique envolvido completamente e passar costura reta. Esta parte será utilizada com clipe nasal;
- f. Fazer três pregas de cima para baixo, considerando o clipe nasal como parte superior;

- g. Passar costura reta para segurar pregas e fechar abas laterais;
- h. Reforçar costura em overlock nas duas laterais;
- i. Recortar tiras de 30 cm em fio roliço de elástico e realizar um nó de macramê forma que não solte (se não souber, dar um nó cego);
- j. Posicionar o fio elástico nas laterais do tecido e dobrar um centímetro da extremidade, de forma que o fio elástico fique totalmente coberto;
- k. Passar costura reta nas laterais e finalizar processo.

### **3 - Observações Gerais de Produção**

A equipe de costura deve higienizar as mãos no início da rotina de trabalho com água e sabão. Também, antes e após ir ao banheiro e antes e após se alimentar;

A equipe de costura deve proceder à higienização de todo o seu equipamento e máquinas, com solução alcoólica a 70% ou solução mais indicada para este fim.

A equipe de costura deve manter rotina de higiene das mãos com solução alcoólica a 70% a cada duas horas, ou sempre que necessário (quando tocar no rosto, tocar na máscara de seu uso, entre outros);

A equipe de costura deve utilizar máscara comum durante a produção e realizar a troca quando a máscara apresentar sujidade ou umidificação e sempre que necessário.

### **Observações Gerais de Uso**

Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidificação;

Não utilizar máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida;

A máscara é de uso individual, não deve ser utilizada por mais de uma pessoa;

Não reutilizar.